

NOTICE D'UTILISATION

**MASQUE
GRAND PUBLIC
CAT-1 / UNS-1
TAILLE ADULTE**



AVERTISSEMENT

Pour protéger votre santé et celle des autres, il est très important de respecter cette notice d'utilisation. Portez ce masque quand vous êtes en contact avec d'autres personnes que celles avec lesquelles vous vivez. Vérifiez toujours que le masque est bien ajusté et couvre votre bouche et votre nez.

Attention : si vous êtes malade, ce masque n'est pas adapté. Demandez l'avis de votre médecin. Ce masque n'est pas destiné au personnel soignant. Ce masque ne remplace pas les gestes barrières (lavage régulier des mains, distanciation physique, réduction des contacts avec d'autres personnes). Il ajoute une barrière physique, à utiliser notamment lorsque vous êtes en contact étroit avec d'autres personnes.

- Ce masque barrière n'est ni un dispositif médical au sens du Règlement UE/2017/745 (masques chirurgicaux), ni un équipement de protection individuelle au sens du Règlement UE/2016/425 (comme masque filtrant de type FFP2).

- Le port de la barbe peut réduire l'efficacité de filtration en dehors des limites visées.

- Ce masque barrière ajoute une barrière physique permettant à l'utilisateur de protéger son environnement contre les projections des particules. Il peut également apporter à l'utilisateur une protection limitée contre les agents infectieux.



COMMENT ENTRETEENIR LE MASQUE ?

Avant ouverture : Stockez le masque dans son emballage d'origine protecteur, dans un endroit sec et à l'abri des rayons du soleil. Conservez-le dans une humidité maximale de 75 % et à une température comprise entre -2°C et + 55°C afin de préserver toutes ses caractéristiques.

Pour le lavage : Lavez le masque à la machine avec de la lessive. Choisissez un programme de lavage qui comprend au moins 30 min à 60°C minimum. Vous pouvez le mettre en machine avec votre linge. Après avoir touché le masque, lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon ou de la solution hydroalcoolique. Les caractéristiques techniques du tissu permettent 30 cycles de lavage ménager. Lorsque la machine est terminée, sortez le masque et reformez les plis sans forcer.

Après le lavage : Faites sécher le masque dans son intégralité (les couches intérieures doivent également être totalement sèches) Pour cela, vous pouvez : utiliser un sèche-linge (en veillant à nettoyer les filtres du sèche-linge et à vous laver les mains après), utiliser un sèche-cheveux, ou encore faire sécher votre masque à l'air libre, sur un support propre et désinfecté.

COMMENT PORTER LE MASQUE ?

Avant de le mettre : Avant de toucher le masque, lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon ou une solution hydro-alcoolique. Inspectez le masque et assurez-vous qu'il n'y a pas de trous, déchirures ou dégradations. Il est recommandé de porter le masque sur une peau nue, en évitant le contact avec les cheveux. Ne modifiez jamais le masque de quelque façon que ce soit.

Pour le mettre : Tenez le masque par les lanières élastiques. Placez-le au niveau de votre bouche. Passez les lanières élastiques derrière les oreilles.

Ajustez le masque de façon à recouvrir le nez, la bouche et le menton : vous pouvez pincer la barrette nasale (selon le modèle de masque) pour vous aider.

Il faut changer le masque : Quand vous avez porté le masque 4h. Quand vous souhaitez boire ou manger. Quand il devient difficile de respirer. Si le masque s'humidifie. Si le masque est endommagé. Si le masque est déformé et ne tient plus correctement contre votre visage.

Pour l'enlever : Lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon ou de la solution hydro-alcoolique. Décochez les lanières élastiques pour décoller le masque de votre visage. En attendant de le laver, isolez-le dans un sac en plastique. Si le masque est déformé ou usé, jetez-le tout de suite dans une poubelle qui se ferme. Repassez votre masque à la vapeur à la température indiquée par le fabricant. Dès que le masque est sec, stockez-le pour le conserver dans un emballage propre hermétique (sachet plastique ou sac de congélation, par exemple).


SÉCURITÉ Avant toute utilisation, veuillez laver une première fois votre masque afin qu'il obtienne sa capacité de filtration > à 90%. Ce masque a démontré une efficacité de filtration à 95,1% et plus après 5 lavages pour des particules de 3 microns émises par la personne portant le masque. La respirabilité du masque a été mesurée à 168.3 L.m-2.s-1 et doit permettre son port pour une durée de 4h. Test au porter pendant 4h réalisé par nos soins.

COMPOSITION

2 couches (100% COTON + 100% POLYESTER).

AVERTISSEMENT

Malgré tout le soin apporté à la fabrication de ces masques, il appartient au seul utilisateur, et en aucun cas au fabricant ou au fournisseur, de s'assurer de l'adéquation du masque avec les caractéristiques du milieu d'usage. Il convient de suivre scrupuleusement les recommandations et modalités d'usage décrites ci-dessus.

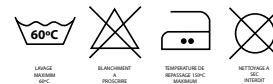

www.uninksport.com

RETROUVEZ L'ENSEMBLE DE NOS PRODUITS AINSI QUE LA NOTICE COMPLÈTE ET TÉLÉCHARGEABLE SUR NOTRE SITE WWW.UNINKSPORT.COM

DECOMPTÉ DES LAVAGES DE VOTRE MASQUE DE PROTECTION UNINKSPORT

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30									

FABRIQUÉ PAR UNINKSPORT

